

解析結果のご報告について

☐ 解析は検体を検査ラボで受領後、1～2週間を目安に完了いたします。

※普通郵便での郵送のため、検体をポストに投函いただいてから、
検査ラボ到着まで1週間以上を要する場合があります。

※混雑状況によっては、解析結果のご返却までに3～4週間を要する
場合があります。ご了承ください。

☐ 解析レポートは、解析レポート返送用住所シールへご記入いただいた住所へ郵送いたします。

※ご住所の記載に誤りがあった場合は解析レポートをご返却できません。
しばらく経っても解析レポートが届かない場合は、お問い合わせ
フォームより検査シリアル番号を含めご連絡くださいませ。

使用上の注意（必ずお読みください）

☐ 本製品は診断を目的とするものではありません。

☐ 解析結果で気になることがある場合は、必ず医療機関を受診の上、
歯科医にご相談ください。

☐ 本製品を未使用の状態で保管される場合は高温多湿を避け、
直射日光が当たらない場所で保管してください。

☐ 検体を採取後は速やかに検査ラボへご返送ください。

5

取り扱い説明書

☐ 取得した個人情報は、個人情報保護法に従い、適切に管理します。
提出いただいた情報はご本人の合意なしに第三者に提供される
ことはありません。

お問い合わせ

本製品へのお問い合わせは、下記URLのお問い合わせフォーム
またはE-mailよりご連絡ください。



www.peritoa.tech/contact



peritoa.service@peritoa.tech



QRコード

販売・製造元

ライン株式会社

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町1-9-4 SHONENGAHO-2 8F

2026.06

6

Ver. 1.1



内容物について


中身を全て取り出し、以下の7点が揃っていることを確認してください。

検査規約・同意書

検体返送用袋

スワブ



サンプリングシート

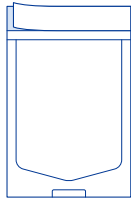

返送用封筒

表紙カード

解析レポート
返送用住所シール

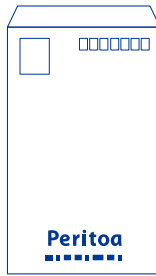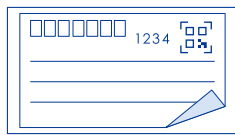

実施前の注意点

□ 唾液採取の前に歯磨きや殺菌成分を含む洗口液やうがい薬を使用すると正確な検査ができませんのでご注意ください。

Point



唾液採取は寝起き直ぐでの実施がおすすめです。

1

サンプリング方法

1. スワブで歯磨きをするように上下の歯の表面や裏側をこすりながら、スワブを十分に唾液で湿らせてください。

奥歯も!

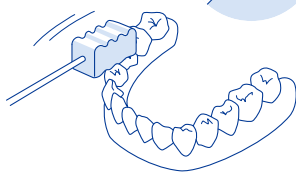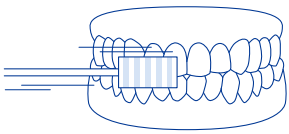

Point

口腔内が乾燥している場合は、予め唾液で口腔内を湿らせてから行ってください。


注意

口腔内が乾燥した状態で強く擦ると、出血する恐れがあるため、無理に擦ることはお止めください。

2. サンプリングシート内の中央部分に、スワブを押し当て、唾液で赤い色が浮かび上がるまで湿らせてください。

こすらない!

赤い色が
浮かび上がる
まで湿らせる

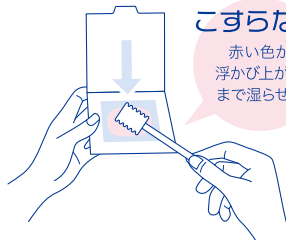

注意

スワブでサンプリングシートを擦って破らないように注意してください。

3. 使用後のスワブを廃棄してください。

3

□ 唾液採取直前の飲食はお控えください。


Point

サンプリングシートにコーヒーや紅茶、口紅等の色が付着しないようにしてください。


はじめる前に

□ 解析レポート返送用住所シールを記入し、返送用封筒に入れてください。

□ 検査規約および同意書をよく読み、同意書にサインをして返送用封筒に入れてください。

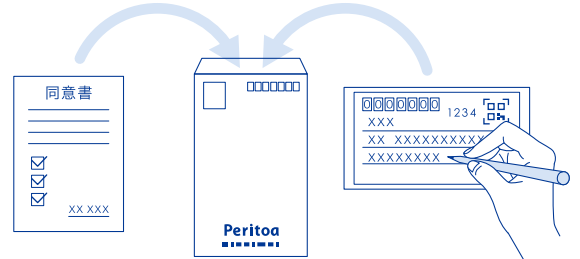


□ 表紙カードの裏面にサンプリングシートのシリアル番号を記入の上、検査結果をお受取りいただくまでご自身で保管してください。

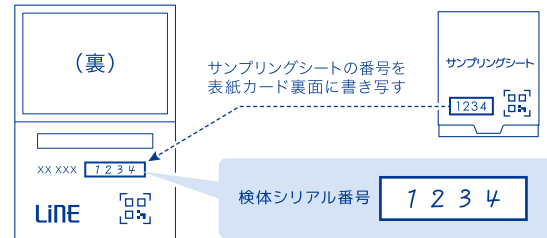

2


4. サンプリングシートの凸部分(A)を図のように差し込み、ふたをしてください。

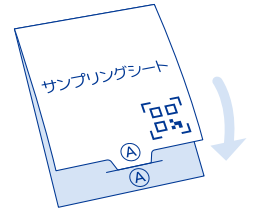

注意

ふたをしないと、アーチ状になりますが、押し潰さずアーチ状を保ったままにしてください。

5. アーチ状にふたをしたサンプリングシートを検体返送用袋、返送用封筒の順番に入れて、ポストに投函してください。

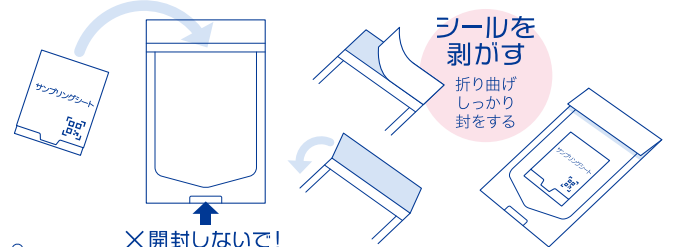

注意

検体返送用封筒は必ずシール側から検体を入れてください。反対側を開封しないでください。

検体返送前のチェックリスト

☑ 検体のシリアル番号を表紙カードの裏に記入して保管しましたか?

☑ 解析レポート返送用住所シールに記入し、返送用封筒に入れましたか?

4